


DEXCOM

G4<sup>®</sup>  
PLATINUM

## Hvordan sette fast senderen

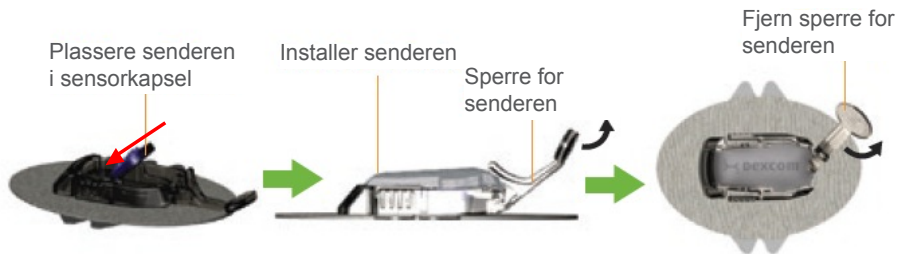

1. Tørk undersiden av senderen med en fuktig klut eller en spritserviett. La det tørke.
2. Sett senderen i sensorkapselen med den flate siden ned. Før inn den smale delen først (som å sette en slalomstøvel i en binding). Senderen skal føres inn foran den lille "vingen", se rød pil.
3. Hold en finger på toppen av senderen og trykk sperren for senderen fremover slik at senderen presses fast i sensorkapselen. Du skal høre to "klikk" som en bekreftelse på at senderen sitter skikkelig fast under begge opphøyningene på sensorkapselen.
4. Ta vekk sperren på sensoren ved å vri den en kvart omdreining.



## Fjerne senderen:

Ta bort sensorkapselen og senderen gjennom å fjerne tapen fra huden og plassere sensorkapselen på et bord (se bilde). Velg mellom å bruke sikkerhetslåsen/sendefrigjøreren for å løsne senderen, eller ved å bruke pekefingerene til å folde ut flikene slik at senderen "popper" ut av sensorkapselen.

1. Trykk ned sikkerhetslåsen/sendefrigjøreren mellom flikene og senderen (slik som vist på bildet) til den stopper. Senderen vil "poppe" ut av sensorkapselen.
2. Du kan også bruke pekefingerene til å folde ut flikene bak på sensorkapselen. Senderen vil da "poppe" ut av sensorkapselen.

