


DEXCOM

G4[®]
PLATINUM

Symboler og tiltak

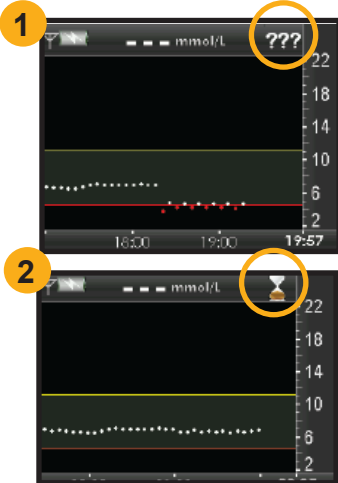

1. Tre spørsmålstejn i statusfeltet betyr at mottakeren for øyeblikket ikke kan tolke signalene som sensoren sender. Normalt begynner den å vise verdiene igjen av seg selv, men det kan i blant ta noen timer. Vent til mottakeren gir deg beskjed om å gjøre en ny kalibrering. Kalibrer **ikke** så lenge det står "???" i statusfeltet.

2. Timeglass i statusfeltet innebærer at mottakeren har oppdaget et problem med signalene fra sensoren. Vent minimum 30 minutter på en ny beskjed fra mottakeren. Kalibrer ikke så lenge du **ikke** får verdier fra mottakeren.

3. Sensoren kan ikke kalibreres for øyeblikket. Vent 15 minutter og gjør en ny kalibrering og avvent i 15 minutter. Om skjermen fortsatt synes, gjør ytterligere en kalibrering og vent i nye 15 minutter. Hvis ingen sensorverdier vises i mottakeren etter disse tiltakene, skal sensoren byttes ut. Noter serienummeret på sensoren som finnes under "vingen" på sensorplaten og kontakt oss for reklamasjon.

4. Sensoren kan ikke kalibreres for øyeblikket. Vent minst en time og gjør en ny kalibrering. Hvis ingen sensorverdier vises i mottakeren etter dette, må sensoren byttes. Noter serienummeret på sensoren som finnes under "vingen" på sensorplaten og kontakt oss for reklamasjon.

5. Sensorfeil innebærer at mottakeren har registrert en feil på sensorsignalene og avslutter sesjonen. Trykk på "VELG" for å bekrefte og bytt ut sensoren. Noter serienummeret på sensoren som finnes under "vingen" på sensorplaten og kontakt oss for reklamasjon.

6. Utenfor rekkevidde/ingen dekning. Dette symbolet betyr at mottakeren og sensoren/senderen ikke kommuniserer med hverandre. Sørg for at mottaker og sender/sensor ikke befinner seg mer enn seks meter fra hverandre.

Tips og viktig informasjon!

- Lad opp mottakeren hver tredje til femte dag i ca 3-5 timer. Du kan bruke en standard stikkontakt, eller gjøre det via en datamaskin. Lukk dekslet for USB-kontakten når du er ferdig.
- Kontroller daglig at plasteret sitter skikkelig fast. Forsterk ved behov. Sett tapen rundt senderen, ikke over (se bilde).
- Du kan gjerne bade og ta badstu med sender og sensor på.
- Rekkevidden mellom sender og mottaker er minst seks meter og *de rekobler seg til hverandre automatisk.*
- Paracetamol (f.eks. Paracet, Pinex, Panodil o.l.) kan påvirke glukoseverdiene og må unngås under måleperioden. Velg andre preparater ved behov for smertestillende, eller febernedsettende medikamenter. Konsulter om nødvendig med en lege som er spesialist innenfor diabetes.

OBS! For mer utfyllende informasjon henviser vi til brukerhåndboken.