








Hva de ulike trendpilene i mottakeren betyr

	<p>Konstant: Glukoseverdien er stabil (stiger/synker ikke mer enn 0,06 mmol/l per minutt). Glukoseverdien kan stige eller falle med opp til 0,8 mmol/l på 15 minutter.</p>
	<p>Økes langsomt: Glukoseverdien stiger 0,06 til 0,11 mmol/l per minutt. Hvis den fortsetter å stige i samme takt, kan den øke opp til 1,7 mmol/l på 15 minutter.</p>
	<p>Øker: Glukoseverdien stiger 0,11 til 0,17 mmol/l per minutt. Hvis den fortsetter å stige i samme takt, kan den øke opp til 2,5 mmol/l på 15 minutter.</p>
	<p>Øker raskt: Glukoseverdien stiger mer enn 0,17 mmol/l per minutt. Hvis den fortsetter å stige i samme takt, kan den øke mer enn 2,5 mmol/l på 15 minutter.</p>
	<p>Synker sakte: Glukoseverdien faller 0,06 til 0,11 mmol/l per minutt. Hvis den fortsetter å falle i samme hastighet, kan den synke opptil 1,7 mmol/l på 15 minutter.</p>
	<p>Synker: Glukoseverdien faller 0,11 til 0,17 mmol/l per minutt. Hvis det fortsetter å falle i samme hastighet, kan den synke opptil 2,5 mmol/l på 15 minutter.</p>
	<p>Synker raskt: Glukoseverdien faller mer enn 0,17 mmol/l per minutt. Hvis den fortsetter å falle i samme hastighet, kan den synke mer enn 2,5 mmol/l på 15 minutter.</p>
<p>Blank (ingen pil)</p>	<p>Hvis ingen forandringshastighet vises: Mottakeren kan ikke beregne hvor fort glukoseverdien stiger eller synker på dette tidspunktet.</p>

Informasjon om varselprofiler

Profiltype	Vibrasjon	Lav	Normal	Tydlig	Repetisjon
					
Høy varsel 	2 lange vibrasjoner	2 lange vibrasjoner + 2 svake pipelyder	2 lange vibrasjoner + 2 mellomhøye pipelyder	2 lange vibrasjoner + 1 stigende melodi	2 lange vibrasjoner + 2 mellomhøye pipelyder
Lav varsel 	3 korte vibrasjoner	3 korte vibrasjoner + 3 svake pipelyder	3 korte vibrasjoner + 3 mellomhøye pipelyder	3 korte vibrasjoner + 1 avtagende melodi	3 korte vibrasjoner + 3 mellomhøye pipelyder
Stigningsvarsel 	2 lange vibrasjoner.	2 lange vibrasjoner + 2 svake pipelyder	2 lange vibrasjoner + 2 mellomhøye pipelyder	2 lange vibrasjoner + 1 kort stigende melodi	2 lange vibrasjoner + 2 mellomhøye pipelyder
Varsel for fallende/synkende 	3 korte vibrasjoner.	3 korte vibrasjoner + 3 svake pipelyder	3 korte vibrasjoner + 3 mellomhøye pipelyder	3 korte vibrasjoner + 2 korte avtagende pipelyder	3 korte vibrasjoner + 3 mellomhøye pipelyder
Varsel om utenfor rekkevidde 	1 lang vibrasjon	1 lang vibrasjon + 1 svak pipelyd	1 lang vibrasjon + 1 mellomhøyt pipelyd	1 lang vibrasjon + 3 korte gjentakende pipelyder	1 lang vibrasjon + 1 mellomhøy pipelyd
3,1-alarmer 	4 korte vibrasjoner.	4 korte vibrasjoner + 4 mellomhøye pipelyder	4 korte vibrasjoner + 4 mellomhøye pipelyder	4 korte vibrasjoner + 2 lange avtagende melodier + opphold + 4 svake pipelyder	4 korte vibrasjoner + 4 svake pipelyder. Sekvensen gjentas hvert 5. sekund.
Øvrig varslinger	1 lang vibrasjon	1 lang vibrasjon + 1 svak pipelyd	1 lang vibrasjon + 1 mellomhøy pipelyd	1 lang vibrasjon + 1 kort melodi	1 lang vibrasjon + 1 mellomhøy pipelyd