

DEXCOM

G4<sup>®</sup>  
PLATINUM

## Sjekkliste ved oppstart av Dexcom G4 Platinum

## Forberedelser før pasienten kommer

1. Lad mottakeren i 4–5 timer.
2. Kontroller dato og tid (se under Innstillinger).
3. Kontroller at senderens ID er korrekt lagt inn i mottakeren (se under Inställningar/SändarID alt Enhetsinfo).
4. Kontroller at lyden er innstilt på Normal (se under Profiler).
5. Tørk av undersiden av senderen med en spritserviett.



## Dette skal du gjøre sammen med pasienten

1. Vis frem de ulike delene i systemet: mottakeren, senderen og sensoren.
2. Still inn sensoren etter instruksjonene. Vask huden nøye med sprit for å få vekk fett og smuss. Tørk det tørt.
3. Fest senderen. Vær oppmerksom på at du skal høre to "klikk". Sjekk at senderen sitter fast under begge "opphøyningene".
4. Start sensoren ved å gå inn i menyen og trykk "start sensor".
5. Gå igjennom hurtigguiden for kalibrering. Tren på å legge inn en kalibreringsverdi i mottakeren. Det påvirker ikke verdiene når det gjøres før 2 timers oppstartsperioden.
6. Still ved behov inn alarmgrenser for høyt og lavt blodsukker.



## Informasjon til pasienten

1. Gi pasienten hurtigguider for Første kalibrering, Symboler og Sensorinnstilling.
2. Paracetamol (Paracet, Pinex, Panodil o.l.) er kontraindisert ved bruk av Dexcom G4 Platinum. Velg andre alternativ, f.eks legemidler som inneholder Ibuprofen.
3. Kontroller daglig at plasteret sitter bra. Forsterk gjerne ekstra rundt senderen ved behov (dekk ikke over senderen, det kan skape kondens).
4. Magnetrontgen (MR) er kontraindisert. Kontroller at magnetrontgen (MR) ikke er planlagt i løpet av de neste syv dagene.