

Ett enkelt och hudvänligt infusionsset som sitter som det ska!

Enkel

- Enkel att hantera, enkel att sätta

Hudvänlig

- Enda kanylen med hudvänlig Tegaderm-häfta

Säker

- Hamnar rätt, ger varken knickar eller stickskador



Aug 2013 WW

Artikel/storlek	Antal	Varunummer
Cleo 90, 6 mm kanyl, mjuk vinkelrät, 60 cm slang	10 st	20 49 69
Cleo 90, 6 mm kanyl, mjuk vinkelrät, 80 cm slang	10 st	20 49 70
Cleo 90, 6 mm kanyl, mjuk vinkelrät, 110 cm slang	10 st	20 49 71
Cleo 90, 9 mm kanyl, mjuk vinkelrät, 60 cm slang	10 st	20 49 72
Cleo 90, 9 mm kanyl, mjuk vinkelrät, 80 cm slang	10 st	20 49 73

Användarinstruktion

1. Tvätta med sprit och torka torrt (fett-och smutsfritt stickställe ger bättre fäste).
2. Vrid av locket.
3. Tryck tills du hör ett "klick" – håll kvar minst 5 sek.
4. Släpp trycket och vik försiktigt insertern åt sidan så att häftan släpper från insertern.
5. Tryck med fingrarna på häftan så att den sitter ordentligt.
6. Koppla på slangens – välj den riktning som passar dig.
7. Fyll kanylen: 0,2 E vid 6 mm och 0,3 E vid 9 mm.

cleo⁹⁰

infusionsset till insulinpump

Fäster och sitter som det ska!

